

Piiloset BioDrop MD Spray, Typenumber F0004	Date:	Revision:	Page:
IFU puola	20.9.2022	3.2	1 of 3

HIALEYE TOP SPRAY


Olej z nasion rokitnika zwyczajnego, kwas hialuronowy, glicerol

Czym jest HIALEYE TOP SPRAY i w jakim celu się go stosuje?

HIALEYE TOP SPRAY to spray do oczu w postaci lipidowej mikroemulsji, który łagodzi oraz zapobiega suchości i podrażnieniu oczu, powiek i skóry wokół oczu. Produkt należy zawsze rozpylać na zamknięte powieki. Emulsja zawiera olej z nasion rokitnika zwyczajnego, który jest powoli rozprowadzany na powierzchni oczu. Olej wzmacnia naturalną warstwę tłuszczową filmu łzowego i chroni przed wysychaniem oka. Obniżenie napięcia powierzchniowego filmu łzowego poprawia jego retencję oraz proces rozprowadzania po powierzchni oka. HIALEYE TOP SPRAY łagodzi i zapobiega podrażnieniom, suchości, pieczeniu i łzawieniu oczu spowodowanym zabiegiem okulistycznym, alergią, soczewkami kontaktowymi oraz różnymi czynnikami środowiskowymi, takimi jak suche powietrze, wiatr, dym, zanieczyszczenie powietrza czy intensywne światło. Zawarty w nim kwas hialuronowy, gliceryna i naturalne antyoksydanty oleju z nasion rokitnika zwyczajnego chronią komórki powierzchni oka i skóry wokół oczu przed uszkodzeniem spowodowanym wysuszeniem i przyspieszają ich regenerację. Kwas hialuronowy oraz gliceryna poprawiają zdolność wiązania wody i nawilżają powierzchnię oka. Spray do oczu w postaci mikroemulsji odświeża oczy, które mogą być zmęczone z powodu korzystania z urządzeń mobilnych, pracy z wyświetlaczem ekranowym, czytania lub prowadzenia pojazdu. HIALEYE TOP SPRAY to sterylny wyrób medyczny, posiadający oznaczenie CE, który został opracowany, wyprodukowany i przebadany klinicznie w Finlandii. Nie zawiera konserwantów ani alkoholu i może być używany przez osoby noszące soczewki kontaktowe czy makijaż oczu. Dzięki specjalnemu kształtowi butelki spray może być używany w każdej pozycji.

Instrukcja użytkowania

Zdjąć zakrętkę zabezpieczającą. Przed pierwszym użyciem rozpylić produkt kilka razy w powietrzu lub na rękę, aby przetestować działanie mechanizmu rozpylającego. Uwaga: na rozpylaczu znajduje się niewielki schodek. Aby rozpylić produkt, należy docisnąć rozpylacz do samego końca. Trzymać butelkę w odległości około 15–20 cm od oczu. Zamknąć oboje oczu, a następnie rozpylić produkt 1–2 razy na powieki.

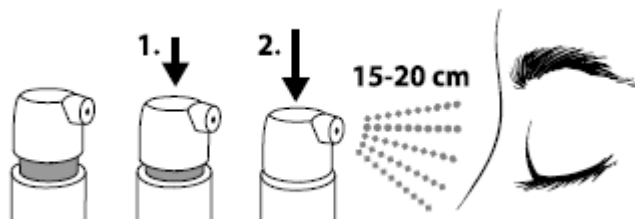

Po zakończeniu aplikacji założyć zakrętkę zabezpieczającą z powrotem na rozpylacz. Spray może być stosowany kilka razy dziennie, także podczas noszenia soczewek kontaktowych. W przypadku używania innych produktów pielęgnacyjnych w okolicy oczu przed rozpyleniem preparatu odczekać co najmniej 10 minut lub użyć tych produktów nie wcześniej niż 10 minut po rozpyleniu preparatu. Aby uniknąć rozmazania makijażu oka w zależności od rodzaju makijażu, można rozpylać preparat z większej odległości. Po otwarciu zużyć w ciągu sześciu (6) miesięcy i przed upływem daty ważności wytłoczonej na butelce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie używać, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone.
- Aby uniknąć zakażenia, nie dotykać powierzchni oka ani skóry końcówką rozpylacza. Nie dotykać końcówki rozpylacza palcami.
- Jeśli produkt dostanie się bezpośrednio do otwartego oka, może spowodować czasowe uczucie dyskomfortu.
- Zużyć w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty otwarcia i przed upływem terminu ważności podanego na butelce i kartonowym opakowaniu.
- Przed zastosowaniem innych leków okulistycznych należy odczekać co najmniej 10 minut.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze 5–25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepła. Nie stosować produktu po rozmrożeniu lub przechowywaniu w wysokich temperaturach przez dłuższy czas.
- Pustą butelkę zutylizować w odpowiedni sposób. Po zużyciu produktu w butelce celowo pozostaje niewielka ilość roztworu ponad gwarantowaną pojemność.

Piiloset BioDrop MD Spray, Typenumber F0004	Date:	Revision:	Page:
IFU puola	20.9.2022	3.2	2 of 3

- O poważnych niepożądanych incydentach związanych ze stosowaniem produktu należy powiadomić producenta, Oy Finnsusp Ab, quality@piiloset.fi / tel. +358 2 489110 oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, e-mail: incydenty@urpl.gov.pl, faks: +48 22 492 11 29.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.

Skład

0,4% olej z nasion rokitnika zwyczajnego (*Hippophae rhamnoides*), kwas hialuronowy, glicerol i emulgatory monooleinian polioksyetylenosorbitanu i monooleinian sorbitanu w postaci emulsji sterylnej i hipotonicznej zbuforowanej trometamolem/ cytrynianem. Nie zawiera środków konserwujących, alkoholu, boranów, oleju mineralnego ani materiałów pochodzenia zwierzęcego.


Data ostatniej aktualizacji: 09/2022



Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto, Finlandia. www.finnsusp.fi

DYSTRYBUTOR:

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

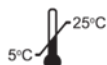

Numer materiału: 2600-1

Piiloset BioDrop MD Spray, Typenumber F0004	Date:	Revision:	Page:
IFU puola	20.9.2022	3.2	3 of 3