

HIALEYE

ULTRA

Sterylny roztwór z hialuronianem sodu, lewokarnityną, olejem rycynowym.

Bez środków konserwujących 0,4% hialuronian sodu.

Nawilżający roztwór do oczu z hialuronianem sodu zapewniający dodatkową ochronę, bez konserwantów.

Wskazany również jako żelowe krople do oczu do stosowania na noc.

Butelka 10 ml

Składniki:

hialuronian sodu, L-karnityna, chlorek cynku, wodorofosforan sodu, diwodorofosforan sodu, chlorek sodu, olej rycynowy virgin, Tween 80, woda.

Jak wygląda Hialeye Ultra?

Hialeye Ultra jest sterylnym, nawilżającym roztworem do oczu w butelce o pojemności 10 ml. Specjalnie zaprojektowana butelka jest wyposażona w mechanizm uszczelnienia końcówki. Zamyka on końcówkę butelki natychmiast po uwolnieniu kropli, zapobiegając wyciekaniu nadmiaru kropli z butelki. Oznacza to również, że w przeciwieństwie do standardowych kropli do oczu, potencjalnie szkodliwe bakterie nie przedostają się do roztworu, co pozwala zachować jego sterylność przez okres maksymalnie 8 tygodni po pierwszym zastosowaniu.

Co to jest Hialeye Ultra?

Hialeye Ultra to roztwór do oczu, bez konserwantów, przeznaczony do łagodzenia suchości i podrażnienia oczu o umiarkowanym i ciężkim nasileniu. Tworzy on na powierzchni oka warstwę ochronną, która nawilża, nawadnia i regeneruje warstwę lipidową filmu łzowego, również w nocy. Jest to ustrukturyzowany żel o wysokiej lepkości, który rozprowadza się równomiernie na całej powierzchni gałki ocznej.

Działa zatem jak osłona chroniąca oko przed działaniem środowiska zewnętrznego i zmniejsza parowanie łez, zapewniając naturalną ulgę od wysuszenia. Dodatkowa ochrona umożliwia naprawę uszkodzonej warstwy lipidowej występującej w zespole suchego oka.

Wyjątkowa formuła **Hialeye Ultra** zawierająca olej rycynowy regeneruje i uzupełnia wszystkie składniki filmu łzowego, tworząc bardziej stabilną warstwę i zapewniając ochronę powierzchni oka, zwłaszcza przy zamkniętych powiekach.

Kiedy stosować produkt?

Hialeye Ultra został zaprojektowany tak, aby chronić oko przez dłuższy czas w ciągu dnia i w nocy dzięki składowi, który zawiera wysokie stężenie hialuronianu sodu, lewokarnitynę i olej rycynowy. Aby uzyskać najlepszą długotrwałą ochronę, należy go stosować tuż przed położeniem się spać (można go stosować również w nocy po przebudzeniu się).

Hialeye Ultra ma zagęszczoną formułę żelową, która chroni oko przez długi czas, zwłaszcza w nocy, gdy powieki są zamknięte. Wysokie stężenie hialuronianu sodu w połączeniu z olejem rycynowym tworzy stabilną i jednorodną warstwę ochronną oka pod zamkniętymi powiekami również przez całą noc.

Jak należy stosować?

W razie potrzeby wklepić 1 lub 2 krople do chorego oka, lekko naciskając na korpus butelki. Jeśli potrzebna jest większa liczba kropli, można bezpiecznie zastosować więcej. Gdy ilość płynu będzie zajmowała mniej niż połowę butelki, w celu podania kropli konieczne będzie nieco mocniejsze naciśnięcie na korpus butelki. Zbyt mocne naciśnięcie spowoduje stały przepływ płynu zamiast kropli.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie używać, jeśli pojemnik jest uszkodzony.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu i butelce.
- Nie dotykać oka końcówką butelki.
- W rzadkich przypadkach po podaniu może wystąpić

przemijające nieznaczne pogorszenie ostrości widzenia spowodowane lepkością roztworu. Z tego powodu zaleca się odczekać kilka sekund przed podjęciem czynności wymagających wyraźnego widzenia.

- Odczekać co najmniej 10 minut przed zakropieniem jakiegokolwiek innego leku do oczu.
- Po pierwszym otwarciu butelki produkt należy zużyć w ciągu 8 tygodni.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie połykać.
- Po zużyciu nie wyrzucać butelki bezpośrednio do środowiska.
- Ze względu na brak szczegółowych danych potwierdzających możliwość stosowania produktu w okresie ciąży lub karmienia piersią oraz możliwość stosowania u dzieci, przed zastosowaniem Hialele Ultra, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego do oczu.
- Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.
- Zazwyczaj produkt jest przeznaczony do ciągłego stosowania nie dłużej niż przez 30 dni. W przypadku utrzymywania się objawów należy skonsultować się z lekarzem.
- Produkt zawiera fosforany. U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki w okresie stosowania roztworów do oczu zawierających fosforany rzadko obserwowano zwapnienie rogówki, dlatego nie należy stosować tego produktu u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem powierzchni rogówki (np.: widoczna nadżerka, owrzodzenie rogówki).
- W przypadku noszenia soczewek kontaktowych należy je zdjąć przed zastosowaniem produktu i nie zakładać ponownie przez co najmniej 15 minut.

Dystrybutor:

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów

NTC Srl

Via Luigi Razza 3

20124 • Mediolan • Włochy



CE 0477

STERILE A

Data aktualizacji: 01/2025